

## TIPOLOGIA ESAME

- TUNEL TEST
- FISH su L.S.

**NOTA BENE:**  
NEL CASO RICHIESTE  
ENTRAMBE LE ANALISI È  
PREFERIBILE AVERE DUE  
RACCOLTE DISTINTE DI  
CAMPIONE.

## CAMPIONE IDONEO

- LIQUIDO SEMINALE:
- quantità minima 2mL
  - CONTENITORE STERILE IN MATERIALE PLASTICO, A BOCCA LARGA, CON TAPPO A VITE

**N.B.**  
RISPETTARE 3-5 GIORNI DI  
ASTINENZA DA RAPPORTI  
SESSUALI PRIMA DELLA  
RACCOLTA

## CONTENITORE



## MODALITÀ OPERATIVE

- **ACCERTARSI CHE IL CAMPIONE SIA CHIUSO ERMETICAMENTE E SIGILLARLO CON PARAFILM.**
- (per i laboratori: possibilmente travasare in provetta falcon da 15mL, sigillata con parafilm, evitando di spedire il contenitore per urine)
- Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dalla raccolta
- CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

## TIPOLOGIA ESAME

- CARIOTIPO
- AFP
- CARIOTIPO MOLECOLARE -aCGH SU L.A.

## CAMPIONE IDONEO

- LIQUIDO AMNIOTICO:
- quantità minima 10mL
  - PROVETTA CONICA STERILE
  - 13x150 da 15mL

**N.B.**  
IN CASO DI L.A.  
EMATICO/BROWN INVIARE  
ANCHE TAMPONE  
BUCCALE MATERNO PER  
ESCLUSIONE  
CONTAMINAZIONE  
MATERNA

## CONTENITORE



## MODALITÀ OPERATIVE

- Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo
- CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

TIPOLOGIA ESAME

- CARIOTIPO
- CARIOTIPO MOLECOLARE - aCGH SU VILLI CORIALI

CAMPIONE IDONEO

- VILLI CORIALI:
- quantità minima 20mg/0.5mL
- PROVETTA CONICA STERILE
- 13x150 da 15mL
  - con aggiunta di terreno di trasporto
  - **INVIARE INSIEME SEMPRE:** TAMPONE BUCCALE MATERNO PER ESCLUSIONE CONTAMINAZIONE MATERNA

CONTENITORE



MODALITÀ OPERATIVE

- Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo
- CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

TIPOLOGIA ESAME

CARIOTIPO MOLECOLARE -aCGH SU MATERIALE ABORTIVO

CAMPIONE IDONEO

- MATERIALE ABORTIVO:
- quantità minima 20mg/0.5mL
  - CONTENITORE STERILE IN MATERIALE PLASTICO, A BOCCA LARGA, CON TAPPO A VITE
- OPPURE
- PROVETTA CONICA STERILE
- 13x150 da 15mL
  - con aggiunta di fisiologica
- INVIARE INSIEME SEMPRE:** TAMPONE BUCCALE MATERNO PER ESCLUSIONE CONTAMINAZIONE MATERNA

CONTENITORE



MODALITÀ OPERATIVE

- **ACCERTARSI CHE IL CAMPIONE SIA CHIUSO ERMETICAMENTE E SIGILLARLO CON PARAFILM.**
- Raccogliere in un contenitore sterile con soluzione fisiologica (se possibile aggiungere qualche goccia di antibiotico)
- **IMPORTANTE:** Il materiale abortivo deve essere necessariamente inviato sotto forma di villo o di lembo di cute se l'epoca gestazionale è superiore a 12 settimane.
- Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal campionamento
- CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
- **NB:** PER CONSEGNE SUCCESSIVE A 24 ORE CONSERVARE IN FRIGORIFERO (4°C -8°C)

TIPOLOGIA ESAME

CARIOTIPO

CAMPIONE IDONEO

- SANGUE INTERO
- quantità minima 5mL
- TAPPO VERDE
- 13x100 da 6,0 mL
  - (Sodio eparina o Litio Eparina)

CONTENITORE



MODALITÀ OPERATIVE

- Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo
- CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

TIPOLOGIA ESAME

CARIOTIPO MOLECOLARE SU SANGUE PERIFERICO  
(Alta Risoluzione CGH Oligo Array)

CAMPIONE IDONEO

- SANGUE INTERO
- quantità minima 5mL
- PROVETTA TAPPO LILLA
- (K2 EDTA)

CONTENITORE



MODALITÀ OPERATIVE

- Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo
- CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

TIPOLOGIA ESAME

BI-TEST

CAMPIONE IDONEO

- SIERO:
- quantità minima 5mL
  - TAPPO ROSSO (gel+clot activator separatore di fase)
- OPPURE
- TAPPO GIALLO

CONTENITORE



MODALITÀ OPERATIVE

- Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo
- CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

## ISTRUZIONI PER L'USO:

### 1 ETICHETTATURA DEL CAMPIONE:

- Apporre "verticalmente" sulla provetta l'etichetta identificativa del paziente e dell'esame COME INDICATO NELL' IMMAGINE 1



- Etichettare la provetta specificando:
  1. nome e cognome della paziente utilizzando un PENNARELLO INDELEBILE
  2. data di nascita della paziente

### 2 CONFEZIONAMENTO DEL CAMPIONE:

- Inserire la provetta nella busta BIO HAZARD rossa per spedizioni internazionali (IMMAGINE 2) la BIO HAZARD BLU per le spedizioni in UK (IMMAGINE 3) in dotazione e poi all'interno del contenitore in dotazione per il trasporto.



(IMMAGINE 2)



(IMMAGINE 3)

**N.B. Si raccomanda di evitare la spedizione in prossimità del week end e delle festività**

### 3 MODULISTICA:

Al campione devono essere allegati lo specifico modulo di richiesta e consenso compilati e firmati. Si raccomanda di compilare nella scheda di accettazione che accompagna il campione la parte relativa all'Indicazione all'esame.

Mod.PR11.A1 Rev.25

eurofins | Genoma

Timbro laboratorio/medico

Modello Scheda di Accettazione Campioni (Laboratori/Medici) Data: \_\_\_\_\_

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE

Nome Campione/ Codice Campione: \_\_\_\_\_ Luogo e Data di nascita: \_\_\_\_\_

Data del prelievo: \_\_\_\_\_ Indicazioni all'esame: \_\_\_\_\_

(si ricorda che in caso di minore è necessario compilare il consenso informato dedicato allegando documenti d'identità del minore e di tutti i tutori legali)

TIPO CAMPIONE BIOLOGICO

## MODALITA' DI PRELIEVO TAMPONE BUCCALE CON CYTOBRUSH:

Durante l'ora precedente alla raccolta:

- Non mangiare
- Non bere
- Non fumare
- Non masticare gomme
- Non lavare i denti

Prima di procedere, controllare che i tamponi buccali siano ben sigillati.



1. Eseguire un risciacquo della bocca con acqua naturale a temperatura ambiente.
2. Aprire la confezione dalla parte opposta rispetto alle setole del tampone.
3. Estrarre il tampone.

**ATTENZIONE! Non toccare la testa del tampone per evitare la contaminazione.**

4. Strofinare il tampone sulle pareti interne di entrambe le guance, per un totale di almeno 60 secondi.

5. Inserire nuovamente il tampone nella confezione in cui era inizialmente contenuto. Chiudere la bustina piegandola su sé stessa un paio di volte.

SCRIVERE IL NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA DELLA PAZIENTE SULLA CONFEZIONE DEL TAMPONE.

6. Conservare e spedire i campioni a temperatura ambiente

