

TIPOLOGIA ESAME	CAMPIONE IDONEO	CONTENITORE	MODALITA' OPERATIVE
- TUNEL TEST - FISH su L.S. NOTA BENE: NEL CASO RICHIESTE ENTRAMBE LE ANALISI È PREFERIBILE AVERE DUE RACCOLTE DISTINTE DI CAMPIONE.	LIQUIDO SEMINALE: quantità minima 2mL CONTENITORE STERILE IN MATERIALE PLASTICO, A BOCCA LARGA, CON TAPPO A VITE N.B. RISPETTARE 3-5 GIORNI DI ASTINENZA DA RAPPORTI SESSUALI PRIMA DELLA RACCOLTA;		<u>ACCERTARSI CHE IL CAMPIONE SIA CHIUSO ERMETICAMENTE E SIGILLARLO CON PARAFILM.</u> (per i laboratori: possibilmente travasare in provetta falcon da 15mL, sigillata con parafilm, evitando di spedire il contenitore per urine); Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dalla raccolta CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
- CARIOTIPO - AFP - CARIOTIPO MOLECOLARE - aCGH SU L.A.	LIQUIDO AMNIOTICO: quantità minima 10mL PROVETTA CONICA STERILE 13x150 da 15mL N.B. IN CASO DI L.A. EMATICO/BROWN INVIARE ANCHE <u>TAMPONE BUCCALE MATERNO</u> PER ESCLUSIONE CONTAMINAZIONE MATERNA		Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

• CARIOTIPO • CARIOTIPO MOLECOLARE - aCGH SU VILLI CORIALI	VILLI CORIALI: quantità minima 20mg/0.5mL PROVETTA CONICA STERILE 13x150 da 15mL con aggiunta di terreno di trasporto <u>INVIARE INSIEME SEMPRE:</u> <u>TAMPONE BUCCALE MATERNO</u> <u>PER ESCLUSIONE</u> <u>CONTAMINAZIONE MATERNA</u>		Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
• CARIOTIPO MOLECOLARE -aCGH SU MATERIALE ABORTIVO	MATERIALE ABORTIVO: quantità minima 20mg/0.5mL CONTENITORE STERILE IN MATERIALE PLASTICO, A BOCCA LARGA, CON TAPPO A VITE OPPURE PROVETTA CONICA STERILE 13x150 da 15mL con aggiunta di fisiologica <u>INVIARE INSIEME SEMPRE:</u> <u>TAMPONE BUCCALE MATERNO</u> <u>PER ESCLUSIONE</u> <u>CONTAMINAZIONE MATERNA</u>		<u>ACCERTARSI CHE IL CAMPIONE SIA CHIUSO ERMETICAMENTE E SIGILLARLO CON PARAFILM.</u> Raccogliere in un contenitore sterile con soluzione fisiologica (se possibile aggiungere qualche goccia di antibiotico); IMPORTANTE: Il materiale abortivo deve essere necessariamente inviato sotto forma di villo o di <u>lembo di cute</u> se l'epoca gestazionale è superiore a 12 settimane. Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal campionamento CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE NB: PER CONSEGNE SUCCESSIVE A 24 ORE CONSERVARE IN FRIGORIFERO (4°C -8°C)

CARIOTIPO	SANGUE INTERO quantità minima 5mL TAPPO VERDE 13x100 da 6,0 mL (Sodio eparina o Litio Eparina)		Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
CARIOTIPO MOLECOLARE SU SANGUE PERIFERICO (Alta Risoluzione CGH Oligo Array)	SANGUE INTERO quantità minima 5mL PROVETTA TAPPO LILLA (K2 EDTA)		Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
BI-TEST	SIERO: quantità minima 5mL TAPPO ROSSO (gel+clot activator separatore di fase) OPPURE TAPPO GIALLO		Spedire al laboratorio entro 12/24 ore dal prelievo CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L'USO:

ETICHETTATURA DEL CAMPIONE:

- Apporre “verticalmente” sulla provetta l’etichetta identificativa del paziente e dell’esame **COME INDICATO NELL’IMMAGINE 1**



Immagine 1

- Etichettare la provetta specificando:
 - a) Nome e cognome della paziente **utilizzando un PENNARELLO INDELEBILE**
 - b) Data di nascita della paziente

N.B. Si raccomanda di evitare la spedizione in prossimità del week end e delle festività

CONFEZIONAMENTO DEL CAMPIONE:

Inserire la provetta nella busta BIO HAZARD in dotazione (IMMAGINE 2) e poi all'interno del contenitore in dotazione per il trasporto.



Immagine 2

MODULISTICA:

Al campione devono essere allegati lo specifico modulo di richiesta e consenso compilati e firmati.

Si raccomanda di compilare nella scheda di accettazione che accompagna il campione la parte relativa all'Indicazione all'esame.

Mod. PR 11 A1 Rev. 27
del 31/10/2024

eurofins | Genoma

Timbro Medici/Laboratori

Scheda Accettazione Campioni
da inviare a Eurofins Genoma Group

(*Campo obbligatorio) Data: _____

DATI ANAGRAFICI (Compilare in stampatello)

Nome*: _____ Cognome*: _____ Data di nascita*: _____

Codice fiscale*: _____ Luogo di nascita*: _____ Prov.: _____

Codice Campione (Riservato al Medico): _____ Data di prelievo*: _____ Sesso*: F ☐ M ☐

TIPO CAMPIONE* (Selezionare la/e casella/e corrispondente/i e/o compilare)

☐ Sangue periferico (EDTA) ☐ Liquido Amniotico

☐ Sangue periferico (EPARINA) ☐ Villi Coriali

☐ Tampone (Specificare) _____ ☐ Liquido Seminale

☐ Altro (Specificare) _____

ANALISI RICHIESTA* (Selezionare la/e casella/e corrispondente/i e compilare)

MODALITA' DI PRELIEVO TAMPONE BUCCALE CON CYTOBRUSH:

Durante l'ora precedente alla raccolta:

- Non mangiare
- Non bere
- Non fumare
- Non masticare gomme
- Non lavare i denti



Prima di procedere, controllare che i tamponi buccali siano ben sigillati.

1. Eseguire un risciacquo della bocca con acqua naturale a temperatura ambiente.
2. Aprire la confezione dalla parte opposta rispetto alle setole del tampone.
3. Estrarre il tampone.

ATTENZIONE! Non toccare la testa del tampone per evitare la contaminazione.

4. Strofinare il tampone sulle pareti interne di entrambe le guance, per un totale di almeno 60 secondi.
5. **Inserire nuovamente il tampone nella confezione in cui era inizialmente contenuto.** Chiudere la bustina piegandola su sé stessa un paio di volte. **SCRIVERE IL NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA DELLA PAZIENTE SULLA CONFEZIONE DEL TAMPONE.**
6. Conservare e spedire i campioni a temperatura ambiente.