

TIPOLOGIA ESAME	CAMPIONE IDONEO	CONTENITORE	MODALITA' OPERATIVE
RICERCA ACIDI NUCLEICI AGENTI PATOGENI PER: - TOXOPLASMA GONDII - HIV DNA - PARVOVIRUS B19 - VZV	SANGUE INTERO quantità minima 4mL per ogni provetta inviata TAPPO LILLA da 4,0 mL (K2 EDTA) N.B. E' RICHIESTO L'INVIO DI UNA PROVETTA <u>PER OGNI ANALITA RICHIESTO</u>		Mantenere la provetta a temperatura ambiente o in frigo a +4°C fino alla spedizione. Spedire al laboratorio entro 24 ore dal prelievo. CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
RICERCA ACIDI NUCLEICI AGENTI PATOGENI PER: - HBV-DNA - HCV-RNA - GENOTIPIZZAZIONE HCV - HDV - RUBEOVIRUS - HHV6 - HIV-RNA - EBV - CMV - HERPES SIMPLEX VIRUS 1/2	SIERO/PLASMA quantità minima 4mL per ogni provetta inviata TAPPO ROSSO (gel+clot activator separatore di fase) N.B. E' RICHIESTO L'INVIO DI UNA PROVETTA <u>PER OGNI ANALITA RICHIESTO</u>		Possibilmente centrifugare per 10' a 3000 rpm per separazione plasma; Spedire al laboratorio entro 12 ore dal prelievo. <u>Confezionare il campione utilizzando gel packs precedentemente refrigerato e bustina bio hazard.</u> CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA Per spedizioni successive alle 12 ore congelare il siero/plasma

RICERCA ACIDI NUCLEICI AGENTI PATOGENI SU: • URINE	URINE quantità minima 10mL CONTENITORE STERILE IN MATERIALE PLASTICO, A BOCCA LARGA, CON TAPPO A VITE.		ACCERTARSI CHE IL CAMPIONE SIA CHIUSO ERMETICAMENTE Raccogliere le urine del mattino, primo mitto, in un contenitore sterile e mantenere a +4°C. Spedire al laboratorio entro 12 ore dalla raccolta. <u>Confezionare il campione utilizzando gel packs precedentemente refrigerato e bustina bio hazard.</u> CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA
RICERCA ACIDI NUCLEICI AGENTI PATOGENI SU: • FECI	FECI quantità minima 0,5-2 grammi (quantitativo corrispondente alla grandezza di una noce) CONTENITORE CON PALETTA		ACCERTARSI CHE IL CAMPIONE SIA CHIUSO ERMETICAMENTE Spedire al laboratorio non oltre 12 ore dalla raccolta. <u>Confezionare il campione utilizzando gel packs precedentemente refrigerato e bustina bio hazard.</u> CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA

RICERCA DI ACIDI NUCLEICI AGENTI PATOGENI SU: - TAMPONE FARINGEO - TAMPONE MUCOSA ORALE - TAMPONE OCULARE - TAMPONE VAGINALE - TAMPONE ENDOCERVICALE - TAMPONE VULVARE - TAMPONE RETTALE - TAMPONE URETRALE - TAMPONE BALANO-PREPUZIALE	TAMPONI IDONEI: - TAMPONE A SECCO FLOCCATO - CYTOBRUSH - TAMPONE ASTA METALLICA FINE <u>SENZA AGAR</u>		Utilizzare tamponi sterili e riporli nel contenitore "a secco" per analisi di infettivologia molecolare; N.B. nel caso dei CYTOBRUSH riporli nel loro involucro ben chiuso. Spedire al laboratorio entro 24 ore dal prelievo. CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
RICERCA ACIDI NUCLEICI AGENTI PATOGENI SU: LIQUIDO SEMINALE <u>INVIANTE PRIVATO</u>	LIQUIDO SEMINALE: quantità minima 2mL CONTENITORE STERILE IN MATERIALE PLASTICO, A BOCCA LARGA, CON TAPPO A VITE. N.B. RISPETTARE 3-5 GIORNI DI ASTINENZA DA RAPPORTI SESSUALI PRIMA DELLA RACCOLTA;		<u>ACCERTARSI CHE IL CAMPIONE SIA CHIUSO ERMETICAMENTE</u> Spedire al laboratorio entro 12 ore dalla raccolta. CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

RICERCA ACIDI NUCLEICI AGENTI PATOGENI SU: • LIQUIDO SEMINALE <u>INVIANTE LABORATORIO</u>	LIQUIDO SEMINALE: quantità minima 2mL CONTENITORE STERILE IN MATERIALE PLASTICO, A BOCCA LARGA, CON TAPPO A VITE. N.B. RISPETTARE 3-5 GIORNI DI ASTINENZA DA RAPPORTI SESSUALI PRIMA DELLA RACCOLTA;		<u>E' preferibile travasare in provetta falcon da 15 ml, sigillata con parafilm, evitando di spedire il contenitore per urine;</u> Spedire al laboratorio entro 12 ore dalla raccolta. CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
RICERCA DI ACIDI NUCLEICI AGENTI PATOGENI SU • ESPETTORATO • BRONCOASPIRATO	CONTENITORE STERILE IN MATERIALE PLASTICO, A BOCCA LARGA, CON TAPPO A VITE.		ACCERTARSI CHE IL CAMPIONE SIA CHIUSO ERMETICAMENTE E <u>SIGILLATO ACCURATAMENTE CON PARAFILM</u> Spedire al laboratorio entro 12 ore dalla raccolta. CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

RICERCA DI ACIDI NUCLEICI AGENTI PATOGENI SU: LIQUIDO AMNIOTICO	LIQUIDO AMNIOTICO quantità minima 10mL PROVETTA CONICA STERILE 13x150 da 15mL		Spedire al laboratorio entro 24 ore dal prelievo. CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
ENDOMETRIOME Nota: compilare Modulo Specifico e consenso	KIT DEDICATO Prelevare Biopsia endometriale tramite Pipelle e successivamente travasare in una Provetta BD MOLECULAR SWAB SAMPLE BUFFER TUBE <u>N.B.</u> <u>Controllare la data di scadenza della provetta prima dell'utilizzo.</u>		<u>Effettuare il prelievo e conservarlo secondo le istruzioni riportate nel kit da noi fornito;</u> Spedire al laboratorio entro 24 ore dal prelievo. CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

EUBIOME	CAMPIONI RICHIESTI: • UN TAMPONE COPAN VAGINALE A SECCO + • UN TAMPONE CYTOBRUSH ENDO-CERVICALE		Utilizzare tamponi sterili e riporli "a secco" nel loro involucro ben chiuso. Spedire al laboratorio entro 24 ore dal prelievo. CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
EUBIOME ACTIVE	CAMPIONI RICHIESTI: • UN TAMPONE COPAN VAGINALE A SECCO		Utilizzare tamponi sterili e riporli "a secco" nel loro involucro ben chiuso. Spedire al laboratorio entro 24 ore dal prelievo. CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L'USO:

ETICHETTATURA DEL CAMPIONE:

- Apporre "verticalmente" sulla provetta l'etichetta identificativa del paziente e dell'esame **COME INDICATO NELL' IMMAGINE 1**



Immagine 1

- Etichettare la provetta specificando:
 - a) Nome e cognome della paziente **utilizzando un PENNARELLO INDELEBILE**
 - b) Data di nascita della paziente

	MODALITA' DI RACCOLTA ED INVIO CAMPIONI PER BIOLOGIA MOLECOLARE	MOD PR 03 Q Rev.03 del 05/03/2026 PAG. 8/9
---	--	--

CONFEZIONAMENTO DEL CAMPIONE:

Inserire la provetta nella busta BIO HAZARD in dotazione* (IMMAGINE 2) e poi all'interno del contenitore in dotazione per il trasporto.



Immagine 2

* per i campioni che necessitano un trasporto a “TEMPERATURA CONTROLLATA” inserire nella bustina bio hazard insieme al campione anche i gel packs precedentemente refrigerati.

MODULISTICA:

Al campione devono essere allegati lo specifico modulo di richiesta e consenso compilati e firmati.

Si raccomanda di compilare nella scheda di accettazione che accompagna il campione la parte relativa all'Indicazione all'esame.





Mod. PR 11 A1 Rev. 27
del 31/10/2024

Timbro Medico/Laboratori

Scheda Accettazione Campioni

da inviare a Eurofins Genoma Group

(* Campo obbligatorio) Data: _____

DATI ANAGRAFICI (Compilare in stampatello)

Nome*: _____ Cognome*: _____ Data di nascita*: _____

Codice fiscale*: _____ Luogo di nascita*: _____ Prov.: _____

Codice Campione (Riservato al Medico): _____ Data di prelievo*: _____ Sesso*: F ☐ M ☐

TIPO CAMPIONE* (Selezionare la/e casella/e corrispondente/i e/o compilare)

☐ Sangue periferico (EDTA)	☐ Liquido Amniotico
☐ Sangue periferico (EPARINA)	☐ Vili Coriali
☐ Tampone (Specificare) _____	☐ Liquido Seminale
☐ Altro (Specificare) _____	

ANALISI RICHIESTA* (Selezionare la/e casella/e corrispondente/i e compilare)

Mod. PR 11: G 1 Esterno Rev. 00
del 15/03/2024

Timbro Medico/Laboratori

Scheda di Accettazione Microbiologia

da inviare a Eurofins Genoma Group

(* Campo obbligatorio) Data: _____

DATI ANAGRAFICI (Compilare in stampatello)

Nome*: _____ Cognome*: _____ Data di nascita*: _____

Codice fiscale*: _____ Luogo di nascita*: _____ Prov.: _____

Codice Campione (Riservato al Medico): _____ Data di prelievo*: _____ Sesso*: F ☐ M ☐

DATI CAMPIONE* (Selezionare la/e casella/e corrispondente/i e/o compilare)

Tipo di campione: ☐ Thin-prep ☐ Tampone a secco ☐ Tampone in gel ☐ Liquido seminale	Sede del prelievo: ☐ Altro (specificare): _____ ☐ Riucale ☐ Vaginale ☐ Cervicale ☐ Rettale
---	--

ANALISI RICHIESTA* (Selezionare la/e casella/e corrispondente/i e compilare)

MODALITA' DI PRELIEVO TAMPONE BUCCALE CON CYTOBRUSH:

Durante l'ora precedente alla raccolta:

- Non mangiare
- Non bere
- Non fumare
- Non masticare gomme
- Non lavare i denti



Prima di procedere, controllare che i tamponi buccali siano ben sigillati.

1. Eseguire un risciacquo della bocca con acqua naturale a temperatura ambiente.
2. Aprire la confezione dalla parte opposta rispetto alle setole del tampone.
3. Estrarre il tampone.

ATTENZIONE! Non toccare la testa del tampone per evitare la contaminazione.

4. Strofinare il tampone sulle pareti interne di entrambe le guance, per un totale di almeno 60 secondi.
5. **Inserire nuovamente il tampone nella confezione in cui era inizialmente contenuto.** Chiudere la bustina piegandola su sé stessa un paio di volte. **SCRIVERE IL NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA DELLA PAZIENTE SULLA CONFEZIONE DEL TAMPONE.**
6. Conservare e spedire i campioni a temperatura ambiente.