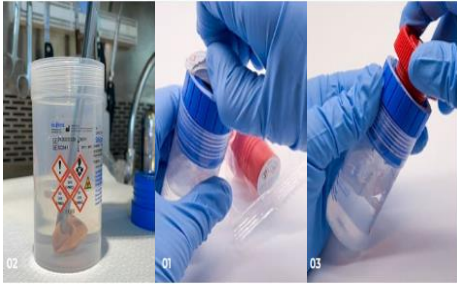


TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	CONTENITORE	INDICAZIONI
BIOPSIE: diametro massimo di 1 cm (biopsie endoscopiche, shave, agobiopsie, etc.)	Contenitore da 33 ml Pre-riempito con formalina 		• Svita il tappo blu. • Inserisci la biopsia all'interno del barattolino contenente la soluzione fisiologica inerte e riavvita il tappo blu • Rimuovi la pellicola di alluminio • Avvita la Capsula Rossa sul tappo blu in modo da rilasciare la formalina nel contenitore in totale sicurezza • Riporre il contenitore in un sacchetto Biohazard con chiusura di sicurezza • Inviare a T ambiente al laboratorio
CITOLOGIA URINARIA (su 3 CAMPIONI)	Tre flaconi pre-riempiti con soluzione conservante		• Raccogliere l'urina della seconda minzione del mattino in tre giorni successivi • Conservare i contenitori a T ambiente e consegnare i tre campioni obbligatoriamente insieme

	LEGENDA CONTENITORI PER ANATOMIA PATOLOGICA	MOD PR 03 T Rev.02 del 20/06/2024 PAG. 2/5
---	--	---

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	CONTENITORE	INDICAZIONI
CITOLOGIA URINARIA (su campione UNICO)	Un flacone pre-riempito con soluzione conservante		• Raccogliere l'urina della seconda minzione del mattino • Conservare il contenitore a T ambiente e consegnare al laboratorio

**PAP TEST su
STRATO SOTTILE
(THIN PREP)**

**Campionatore
ginecologico :**

Un unico movimento rotatorio di questo strumento permette di prelevare sia cellule endocervicali che esocervicali, compresa la zona di trasformazione, con un minor trauma rispetto alle tecniche tradizionali.


Soluzione ThinPrep™

Pap Test PreservCyt:

Flacone da 60 ml pre-riempiti con 20 ml di fissativo (Soluzione conservante tamponata, a base di metanolo. 35–55% di metanolo. CAS 65-56-1)



- Ogni campione **DEVE** essere identificato con Nome e Cognome
- **Metodo di prelievo:** Determinare la posizione da ispezionare o campionare. Spingere in profondità la testa di campionamento del campionatore ginecologico nel sito scelto per il campionamento e utilizzare il metodo rotante o con strofinamento piatto per prelevare il campione.

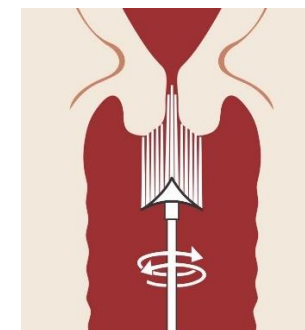

- Il campione prelevato, viene immerso e risciacquato nella fiala di soluzione PreservCyt. Agitare energicamente lo spazzolino in modo da rimuovere il materiale residuo, **dunque gettare il dispositivo di prelievo.**



- **ATTENZIONE:**
- Non utilizzare strumenti di legno, o altri materiali non plastici, per il prelievo dei campioni.
- Non staccare la testa del dispositivo di prelievo a spazzola né depositarla nella fiala.
- **Non lasciare il dispositivo di prelievo nella soluzione.**
- Accertarsi che il contenitore sia chiuso ermeticamente
- Porre il contenitore in un sacchetto Biohazard con chiusura di sicurezza
- Conservare ed inviare al laboratorio a temperatura ambiente

	LEGENDA CONTENITORI PER ANATOMIA PATOLOGICA	MOD PR 03 T Rev.02 del 20/06/2024 PAG. 5/5
---	---	---

--	--	--	--

Istruzioni per l'uso:

Per ogni paziente deve essere compilato il modulo di richiesta in cui vanno riportati:

- struttura e medico richiedente **completo di contatto telefonico**
- data del prelievo
- dati anagrafici completi del paziente, compresa la DATA DI NASCITA
- data ultime mestruazioni
- sede anatomica del prelievo (distinguendo eventuali prelievi multipli con numeri progressivi riportati anche sui contenitori)
- eventuali interventi chirurgici o patologie pregresse
- notizie cliniche pertinenti
- quesito diagnostico
- Evidenziare eventuale rischio infettivo del materiale



La richiesta va firmata dal personale sanitario.

Il modulo di accompagnamento va posto nell'apposita tasca per il cartaceo, fisicamente isolato dal contenitore.

Non saranno accettati :

1. Campioni pervenuti senza identificativo
2. Campioni avvolti nei fogli di accettazione